


- Fold rollatoren helt ud i den låste position inden brug.
- Undgå at sidde på rollatoren, når den er foldet sammen.
- Alle brugere bør opsøge læge eller terapeut ifm. korrekt justering og anvendelse.


## Samlingsvejledning

Kontrollér først, at rollatoren ikke har transportskader. Undgå at bruge rollatoren, hvis der er synlige skader. Kontakt forhandleren for reparation og/eller ombytning.


1. Fold rollatorens ramme helt ud. Fjern plastikfolien omkring hjulene.

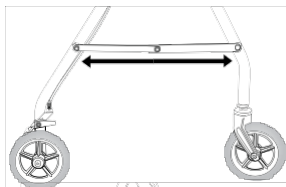


2. Sæt håndtagene i rammens rør. Tilpas højden, så den passer til dig; håndtagene bør være i håndledshøjde. Før den trekantede stjerneskrueknop igennem rammen og håndtagenes huller (figur a & b). Drej med uret, indtil håndtagene er fikseret.

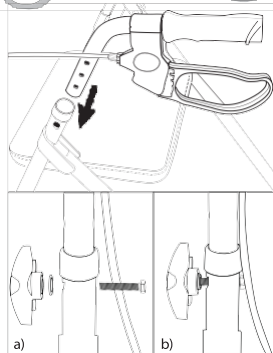

3. Sæt det krumme ryglæn ind i de dertil indrettede slidser på rollatorens forside. Kontrollér, at fikseringen er sikker ved hjælp af et klik.

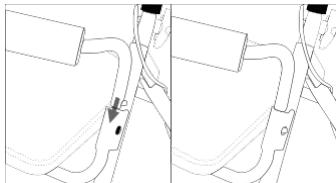


4. Løft sædet op og placér kurven mellem rammens to tværstænger og kontrollér derefter, at de fire bøjler sidder fast på tværstængerne.

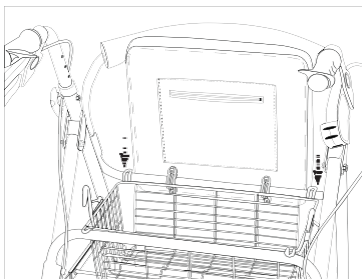

5. Fold sædet fremad.

## Foldning af rollatoren


Løft sædet, fjern kurven og træk i den sorte rem, der er placeret på foldestangen.

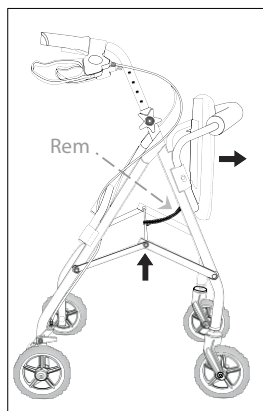

## Bremsning


Bremserne kan bruges til normal bremsning, når man går med rollatoren, eller til parkering, når brugeren ønsker at sidde på sædet.

1. Pres håndtagene opad, for at bremse normalt.

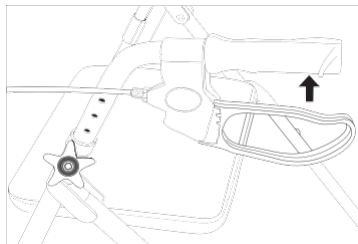

## Parkeringsbremser

1. Tryk begge håndtag ned, indtil de klikker, hvorved parkeringsbremserne aktiveres. Håndtaget låses automatisk og forbliver i denne position.

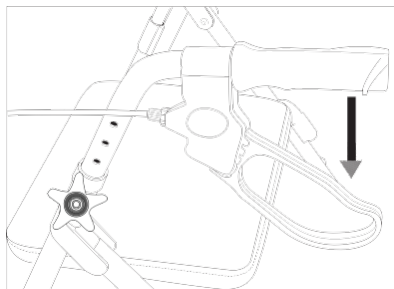

Parkeringsbremse

2. Træk håndtaget på, for at løsne parkeringsbremsen. Håndtaget vender tilbage til sin oprindelige position.

## Justering af håndbremserne

Hvis hjulenes bremsespænding er for løs eller for stram, kan den justeres ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

**Bemærk: Retningerne mod/med uret gælder fra en position bag rollatoren.**

1. Kontrollér, at bremsen ikke er aktiveret.
2. **For at løsne bremsespændingen:** Hold kontramøtrikken fast, mens justeringsskruen drejes med uret.

**Bemærk: Hvis bremseniveauet skraber mod baghjulet, skal bremsespændingen løsnes.**

